

**VNM - Clogin® elle vaginal ovule** là một thiết bị y tế được dùng phòng ngừa và điều trị các rối loạn viêm, nhiễm trùng và loạn dưỡng ở âm đạo. Tác dụng trong trường hợp có mẩn đỏ, ngứa và bỏng rát với các dấu hiệu nhiễm nấm và viêm âm đạo. Axit hyaluronic, với các tính chất dính nhầy, có tác dụng dưỡng ẩm và bảo vệ đối với niêm mạc âm đạo.

### **Chỉ định:**

**Clogin® elle vaginal ovule** được chỉ định trong các trường hợp sau đây:

- hỗ trợ điều trị trước và sau phẫu thuật phụ khoa.
- phòng ngừa rối loạn viêm, loạn dưỡng và nhiễm trùng niêm mạc âm đạo.
- giúp khôi phục độ ẩm và bảo vệ viêm mạc âm đạo;
- tác dụng trong các trường hợp ngứa, mẩn đỏ và kích ứng gây ra bởi các bệnh nấm và viêm âm đạo.

**Thành phần:** một nang 2 g ovule chứa: Axit Hyaluronic Muối Natri, Vitamin E, Bromelain, Chlorhexidine dihydrochloride (chất bảo quản), hỗn hợp triglyceride.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

1. Rửa kỹ vùng sinh dục trước khi sử dụng.
2. Mở bao bì, rửa tay và chỉ lấy một viên đặt ra khỏi vỉ.
3. Nhẹ nhàng đưa viên đặt vào âm đạo, đưa vào sâu nhất có thể.

**Clogin® elle vaginal ovule** có thể được sử dụng một lần mỗi ngày trong 10 ngày hoặc theo tư vấn y khoa. Không được sử dụng quá liều được kê mà không hỏi bác sĩ.

**Cảnh báo:** Sản phẩm chỉ dùng đặt ở âm đạo. Không được uống. Không được sử dụng trong trường hợp quá mẫn hoặc không tương thích với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trong khi mang thai hoặc cho con bú, chỉ được sử dụng sản phẩm nếu tuyệt đối cần thiết và có sự giám sát y khoa trực tiếp; tham khảo ý kiến của bác sĩ của bạn trước khi sử dụng để đánh giá những rủi ro và lợi ích trong trường hợp của bạn. Nếu bạn có kế hoạch mang thai hoặc cho rằng bạn đang mang thai, bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Thông tin cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu gần đây bạn có sử dụng bất kỳ thuốc nào, kể cả thuốc không cần kê toa. Tránh các chất kháng khuẩn và chất tẩy trong khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm này không được sử dụng trong nhi khoa. Để sản phẩm tránh xa tầm mắt và tầm tay của trẻ em. Như với tất cả các sản phẩm thoa ngoài da, sử dụng lâu ngày có thể dẫn đến nhạy cảm hoặc kích ứng cục bộ. Trong trường hợp này, hãy ngưng điều trị và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Không được sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hỏng hoặc không còn nguyên vẹn khi mở ra lần đầu. Không được sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn trên bao bì.

**Bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Ngày hết hạn được cho biết áp dụng cho sản phẩm nguyên vẹn, được bảo quản đúng cách.

**Tác dụng phụ:** Sản phẩm được kiểm tra đến nay không cho thấy sự nhạy cảm hay tác dụng phụ khác. Các thủ tục kiểm nghiệm được thực hiện đến ngày ghi trên sản phẩm không cho thấy tác dụng gây nhạy cảm hay các tác dụng phụ khác.