



## ISIDE HPV SPRAY

Tên thiết bị: Gel xịt âm đạo

Chủng loại: ISIDE HPV SPRAY

### MÔ TẢ THIẾT BỊ Y TẾ

ISIDE HPV SPRAY là thiết bị y tế loại IIa ở dạng gel phun sương sử dụng cho âm đạo.

### THÀNH PHẦN

Nước, Glycerol, Imidazolidinyl ure, Arabinogalactan, Kẽm citrate, Lactic acid, Citric acid, Muối natri của Hyaluronic acid, Polyme acrylic liên kết chéo (polycarbophil), Natri hydrat.

Không chứa gluten.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

ISIDE HPV Spray là thiết bị y tế được chỉ định để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các tổn thương do HPV gây ra. Nhờ công thức dạng gel phun sương, nó được phân bố đều trên niêm mạc của vùng cổ tử cung, tạo thành một hàng rào bảo vệ ngăn ngừa nguy cơ tích hợp của HPV. Nhờ tác dụng phục hồi của nó, nó hỗ trợ quá trình chữa lành các tổn thương do HPV gây ra

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lấy đầu xịt âm đạo ra khỏi lớp vỏ bảo vệ của nó. Tháo nắp ra khỏi bình xịt. Lắp đầu xịt vào bình xịt. Kích hoạt đầu xịt bằng cách nhấn nút đầu xịt cho đến khi sản phẩm xuất hiện. Đưa đầu xịt sâu vào âm đạo, nằm ngửa, gập đầu gối và thực hiện 6 lần xịt trong một lần sử dụng. Vứt bỏ đầu xịt sau khi sử dụng. Đóng bình xịt bằng nắp.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

ISIDE HPV Spray không có chống chỉ định ngoại trừ những bệnh nhân được biết là nhạy cảm với các thành phần có trong sản phẩm.

### CẢNH BÁO

Sản phẩm dùng cho âm đạo. Không được nuốt. Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thận trọng trong trường hợp được xác nhận hoặc được cho là mang thai và trong trường hợp điều trị bằng thuốc tại chỗ đồng thời, do chưa có dữ liệu nghiên cứu và chỉ định cụ thể, việc sử dụng viên đặt âm đạo chỉ được thực hiện sau lời khuyên của bác sĩ. Sản phẩm không dùng cho trẻ em. Để xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em. Việc sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, giống như tất cả các sản phẩm bôi ngoài da, có thể gây mẫn cảm hoặc kích ứng tại chỗ, nếu điều này xảy ra, hãy ngừng điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì hoặc đầu xịt, khi mở lần đầu, bị hư hỏng hoặc không còn nguyên vẹn. Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn ghi trên bao bì. Đầu xịt chỉ được sử dụng một lần: việc tái sử dụng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn sử dụng.



### TÁC DỤNG PHỤ

Không có tác dụng phụ nào được biết hoặc dự kiến liên quan đến việc sử dụng sản phẩm. Các thử nghiệm trên sản phẩm không cho thấy bất kỳ sự nhạy cảm hoặc tác dụng phụ nào khác. Trong trường hợp các triệu chứng dai dẳng hãy đi khám bác sĩ.

### ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt, ở nhiệt độ dưới 25°C. Ngày hết hạn đề cập đến sản phẩm chưa mở nắp và được bảo quản đúng cách.

**CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM:** PIZETA PHARMA S.P.A.

Địa chỉ: Via Roma- Loc. Il Piano, 62039 Visso (MC) - Italy

**CHỦ SỞ HỮU SỔ LƯU HÀNH VÀ NHẬP KHẨU:** CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GKMED

Địa chỉ: NTT34, Tổ hợp nhà ở  
liền kề, số 82 Nguyễn Tuấn,  
Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố  
Hà Nội PIZETA PHARMA S.p.A  
P.VAT/C.F. 01956430431  
Mã hóa đơn: USAL8PV  
ĐT. 075 9474542 Fax 075 9474541  
[www.pizetapharma.com](http://www.pizetapharma.com)  
[info@pizetapharma.com](mailto:info@pizetapharma.com)  
[pizetapharma@pec.pizetapharma.com](mailto:pizetapharma@pec.pizetapharma.com)

Văn phòng đăng ký/  
Trụ sở  
Via Roma snc – Loc. Il Piano  
62039 Visso  
MACERATA (MC)

Văn phòng hành chính/  
Địa chỉ hành chính  
Via Bruno Simonucci, 3  
06135 Ponte San Giovanni  
PERUGIA (PG)

Địa chỉ vận chuyển/  
Địa chỉ kho  
Via F. Fedeli, 2 06034  
Foligno PERUGIA (PG)