

# Fysoline®

Đăng tương

Sau 01 giờ đầu sinh ra, vệ sinh mắt mũi trở thành quy trình chăm sóc bắt buộc với trẻ sơ sinh. Bên cạnh việc vệ sinh mũi giúp phòng ngừa các bệnh liên quan tới đường hô hấp do vi khuẩn, virus gây nên, trẻ sơ sinh cần 06 - 08 tháng để hoàn thiện tuyến lệ nên rất cần duy trì vệ sinh mắt hàng ngày giúp làm sạch và loại bỏ các chất tiết, phòng ngừa các bệnh về mắt cho trẻ như: Tắc tuyến lệ, viêm kết mạc, ghèn mắt...

Fysoline® là dung dịch đăng tương, được chứng nhận vô trùng loại A theo tiêu chuẩn CE tại Châu Âu. Đặc biệt Fysoline® không chứa chất bảo quản nên có thể sử dụng vệ sinh mắt mũi hàng ngày cho trẻ trong thời gian dài.

## Thành phần:

- Natri clorid 0,9g
- Nước tinh khiết vừa đủ 100ml.
- Không chứa chất bảo quản.

## Công dụng:

### Làm sạch mắt:

- Vệ sinh mắt hàng ngày nhằm loại bỏ dị vật, bụi bẩn.
- Hỗ trợ điều trị bệnh viêm kết mạc dưới sự giám sát của cán bộ y tế.

### Làm sạch mũi:

- Vệ sinh mũi hàng ngày trong trường hợp tắc nghẽn chủ yếu ở trẻ sơ sinh mà không thể hỉ (xì) mũi và loại bỏ các chất tiết, chất nhầy trong mũi để ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp trên.
- Giảm tình trạng khô mũi ở người lớn nhờ khả năng giữ ẩm.
- Hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh về tai mũi họng, giúp giảm nhẹ và phòng nhiễm trùng thứ phát bằng cách loại bỏ dư thừa chất nhầy niêm mạc, các vi khuẩn, các dị vật, tác nhân gây dị ứng...

### Làm sạch răng miệng:

- Vệ sinh răng miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

**Cách đóng/ mở nắp:** sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn



Mở ống bằng cách xoay nắp nhựa.



Đặt trẻ ở tư thế thích hợp và bóp nhẹ từng giọt để có được liều cần thiết nhỏ vệ sinh cho trẻ.



Nghiêng 1 góc 45 độ, rồi nhấn mạnh nắp nhựa với phần thân ống để đóng nắp khi chưa dùng hết sản phẩm.

