

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Thiết bị y tế  
**NƯỚC MẮT NHÂN TẠO**  
**VIZULIZE**  
**HYPROMELLOSE 0.3%**

**Thành phần:** Dung dịch đệm đẳng trương với HPMC 0,3% và PHMB.

**Công dụng:** Làm dịu mắt tức thời, giảm cảm giác khô và kích ứng mắt do thời tiết và môi trường. Dưỡng ẩm cho mắt.

**Hướng dẫn sử dụng:** Sản phẩm chỉ dùng cho mắt. Phù hợp ngay cả khi đeo kính áp tròng.

1. Rửa tay trước khi sử dụng.
2. Để mở cần xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ.
3. Nhỏ 2 giọt mỗi bên mắt. Có thể sử dụng nhiều lần trong ngày tùy vào tình trạng của mắt.
4. Sau khi sử dụng, hãy đóng chai thật chặt.

**Cảnh báo an toàn:**

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn hoặc khi bao bì không còn nguyên vẹn.
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa lửa, để xa tầm tay trẻ em.

**Số lô và Hạn sử dụng:** Xem trên bao bì.

**Dung tích:** 10ml

XNCB: 220003365/PCBB-HCM

**Nhà sản xuất:** East Midland Pharma Ltd, Unit 2A, Old Dalby Business Park, Leics, LE14 3NJ, UK.

**Nhà nhập khẩu:** Công ty TNHH INTERSHOP

Trụ sở chính: 272/6 Nguyễn Tiểu La, P. 08, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh.

[www.intershop.com.vn](http://www.intershop.com.vn)

**Xuất xứ:** Anh