


# nebial 3% KIT

Bộ thiết bị xịt xông mũi Spray-sol Pediatrico®

## BỘ THIẾT BỊ XỊT XÔNG MŨI CHUYÊN DỤNG CHO TRẺ EM


- Thao tác chỉ trong một vài giây
- Không sử dụng điện hay cần mặt nạ
- Dễ dàng vệ sinh và có thể được tái sử dụng
- Dễ dàng mang theo cần đi chuyển xa
- Cấu tạo bởi các thành phần nhựa an toàn và silicon mềm
- Hình dạng được thiết kế phù hợp cho lỗ mũi của em bé

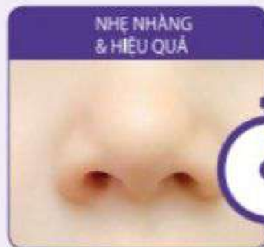

Trung bình  
xịt xông  
5ml dung dịch  
Nebial 3%  
trong 4s

## KHẢ NĂNG TIẾP CẬN SÂU & KIỂM SOÁT ÁP LỰC VƯỢT TRỘI

- Dung dịch qua thiết bị xịt xông Spray-sol tạo thành các hạt dung dịch kích thước cực nhỏ ( $16\mu m$ ), cho phép tiếp cận đến vùng sâu và vùng trên của hốc mũi, là những vị trí khó có thể tiếp cận được bằng các thiết bị bình xịt rửa thông thường.
- Hiệu quả sâu giúp giải phóng tình trạng nghẹt mũi, sổ mũi, tạo điều kiện cho trẻ hô hấp và ngăn ngừa tình trạng ứ đọng chất nhầy, ổ viêm. Giúp cải thiện kết quả thăm khám trên lâm sàng.
- Khả năng kiểm soát áp lực dòng chảy giúp tránh tổn thương niêm mạc mũi, không đẩy dịch nhầy, vi khuẩn vào tai, xoang hầu – họng gây các biến chứng viêm tai giữa, viêm amidan.

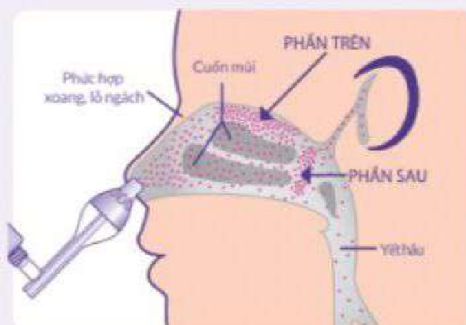

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Vặn nắp, mở ống dung dịch Nebial 3% đi kèm trong bộ KIT. Cắm đầu xi lanh và ống dung dịch Nebial 3% và hút toàn bộ dung dịch.




2. Vặn chặt đầu xi lanh vào đầu của thiết bị xịt xông mũi Spray-sol.

### 3a. ĐỐI VỚI TRẺ DƯỚI 1 TUỔI



Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thực hiện thao tác xịt xông mũi bằng cách để trẻ nằm nghiêng, lấy tay giữ đầu và nhẹ nhàng đưa thiết bị Spray-sol vào lỗ mũi. Đẩy pit-tông với 1 lực vừa đủ để đưa 1/2 lượng dung dịch vào trong mũi trẻ.

### 3b. ĐỐI VỚI TRẺ TRÊN 1 TUỔI

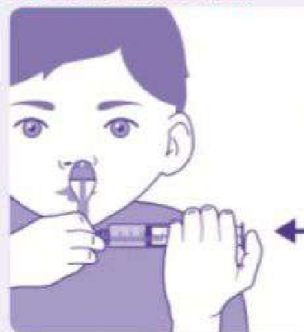

Với trẻ lớn hơn 1 tuổi, người lớn hỗ trợ hoặc giám sát trẻ tự thực hiện. Tư thế cho trẻ ngồi, hướng ngực về phía trước, đầu hơi xoay sang 1 bên và đưa thiết bị Spray-sol vào lỗ mũi. Đẩy pit-tông với 1 lực vừa đủ để đưa dung dịch vào trong mũi trẻ.

4. Lặp lại tương tự với mũi còn lại. Cố gắng phân chia dung dịch chứa trong xi-lanh bằng nhau giữa hai lỗ mũi. Hút, lau sạch dịch mũi hoặc hướng dẫn trẻ xì mũi để loại bỏ dịch nhầy ra khỏi mũi.

buOna