

Vagiflux

Vaginal Washing Kit

Vagiflux

Vaginal Washing 'Kit'

*Sạch hơn, sâu hơn
một cách dịu dàng đến từng tế*



Vagiflux

Vaginal Washing Kit

Thành phần gói mẫu pha trong 100 ml:

- NaCl 0.9%
- Alpha Glucoside 0.2%
- Vitamin E 0.2%
- Acid acetic vừa đủ pH4 trong 100ml

Ưu điểm:

- Bộ sản phẩm VAGIFLUX sử dụng bình và vòi rửa được thiết kế phù hợp giúp việc rửa sâu và sạch hơn trong phụ khoa cho phụ nữ, được sản xuất bằng vật liệu nhựa y tế đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và bền vững.
- Dung dịch muối với công thức được bảo vệ với pH phù hợp với sinh lý niêm mạc và môi trường âm đạo, với Alpha Glucoside giúp tăng cường tác dụng loại bỏ vi khuẩn, nấm, và ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh.
- Vagiflux có tác dụng vệ sinh và loại bỏ các tác nhân gây bệnh: vi khuẩn, nấm, các chất dịch bẩn.

Lot No (LX)
Mfg. date (NGX)
Exp. date (HC)



Vagiflux

Vaginal Washing Kit

*Sạch hơn, sâu hơn
một cách dịu dàng đến từng tế*



Vagiflux

Vaginal Washing Kit

Chỉ định của VagiFlux:

Dùng các trong các trường hợp:

- Viêm nhiễm âm đạo, âm hộ do vi khuẩn, nấm.
- Viêm tử cung, Viêm nhiễm phụ khoa có mùi khó chịu, có khí hư.
- Khử mùi hôi khó chịu, duy trì độ ẩm tự nhiên cho âm đạo, mang lại cảm giác dễ chịu, se khít sau khi sử dụng.
- Vệ sinh hàng ngày ngăn ngừa nhiễm khuẩn, ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.
- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt.

Phân phối:

Công ty TNHH Phyté Việt Nam
15A Ngõ 3, Phan Đình Giót, Hà Đông,
Hà Nội

Hotline: 04 6254 1886 - 04 329 39888

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ H VÀ X

Ngõ 122 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng
Mai, Hà Nội

VAGIFLUX – BỘ RỬA ÂM ĐẠO

I. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2017/H&X và TCCS 03:2017/H&X
- Tiêu chuẩn quốc gia: QCVN 12-1:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm)

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ưu điểm:

- Bộ sản phẩm VAGIFLUX sử dụng bình vệ sinh rửa được thiết kế phù hợp giúp việc rửa sâu và sạch hơn trong phụ khoa cho phụ nữ, được sản xuất bằng vật liệu nhựa y tế đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn và tiện dụng.
- Dung dịch muối với công thức được bào chế với pH phù hợp với sinh lý niêm mạc và môi trường âm đạo, với Alpha-Bisabolol giúp tăng cường tác dụng loại bỏ vi khuẩn, virus,... và ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh
- VagiFlux có tác dụng vệ sinh và loại bỏ các tác nhân gây bệnh: vi khuẩn, nấm, các chất dịch bẩn.

Chỉ định của VagiFlux:

Dùng các trong các trường hợp:

- Viêm nhiễm âm đạo, âm hộ: do vi khuẩn, nấm,
- Viêm tử cung, Viêm nhiễm phụ khoa có mùi khó chịu, có khí hư.
- Khử mùi hôi khó chịu, duy trì độ ẩm tự nhiên cho âm đạo, mang lại cảm giác dễ chịu, sse khít sau khi sử dụng.
- Vệ sinh hàng ngày ngăn ngừa nhiễm khuẩn, ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.
- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt.



Cách sử dụng:

- Bước 1: Mỗi lần rửa lấy 01 ống dung dịch Vagiflux, rót vào bình, cho nước ấm (nước sạch, vô khuẩn, có thể dùng nước đun sôi để nguội) vào đến miệng chai (đủ 100ml).
- Bước 2: Vặn nắp và lắc đều để hòa tan dung dịch vệ sinh.
- Bước 3: Đặt đầu phun của chai vào miệng âm đạo ở tư thế ngồi thích hợp
- Bước 4: Từ từ bóp nhẹ bình để dung dịch vệ sinh tự động chảy vào và thoát ra ngoài theo các khe của miệng đầu phun, duy trì tốc độ dòng chảy cho đến khi nước & dịch trong vùng kín chảy ra hết.

Ngày rửa 1-2 lần, mỗi lần rửa với 100 mL dung dịch hỗn hợp muối.

Chống Chỉ định: Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Lưu ý: Không sử dụng muối tinh khiết, dung dịch nước muối vệ sinh vết thương thay cho hỗn hợp dung dịch muối.

Phân phối bởi:

Công ty TNHH Phyto Việt Nam

15A Ngõ 3, Phan Đình Giót, Hà Đông, Hà Nội

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Ngõ 122 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

