

TỜ HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG

URGO MOUTH ULCERS, Hương vị trái cây, filmogel®

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị nhiệt miệng (1-2 vết nhiệt miệng, đường kính < 1 cm) và các vết thương nhỏ trong khoang miệng.

NHIỆT MIỆNG LÀ GÌ?: Là tổn thương bề mặt niêm mạc miệng biểu hiện dưới dạng một vết loét có viền sắc nét, nền màu trắng, xung quanh màu đỏ tươi. Nguyên nhân gây ra nhiệt miệng vẫn chưa được nghiên cứu rõ, tuy nhiên, một vài yếu tố có thể dẫn đến nhiệt miệng như: di truyền, thực phẩm, tổn thương thực thể (cắn vào niêm mạc miệng, răng giả), một số loại thuốc, căng thẳng hoặc do hoóc – môn.

URGO MOUTH ULCERS HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Khi bôi lên vết thương sẽ hình thành lớp màng trong suốt mỏng và linh hoạt, có tác dụng:

- Cách ly vết loét khỏi thức ăn và nước bọt suốt 4 giờ
- Giảm đau
- Thúc đẩy quá trình lành thương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Quét sạch một mặt của dụng cụ bôi lên cạnh chai.
- Dùng lượng gel ở mặt còn lại của dụng cụ bôi lên vết thương để che phủ hoàn toàn vết loét.
- Để khô trong khoảng 10 giây, sau đó ngậm miệng lại: lớp màng hữu hình được hình thành.
- Nếu vết thương chưa được bao phủ hoàn toàn, lặp lại việc bôi gel lên vết thương một lần nữa.
- Bôi gel lại nhiều lần nếu cần thiết, mỗi ngày từ 3 đến 4 lần, tốt nhất dùng trước bữa ăn cho đến khi lành vết thương (3-5 ngày). Nếu vẫn còn lớp màng thì không cần thiết phải bôi gel lần mới.
- Sản phẩm chứa thành phần giúp đảm bảo tính vệ sinh, do đó không cần thiết để lau dụng cụ bôi sau khi sử dụng.

THÀNH PHẦN: Dẫn xuất Cellulose, Acid Mineral, Acid Carboxylics, Cồn, Hương trái cây, Sucralose, Nước cất

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng trong trường hợp vết nhiệt miệng có kích thước lớn (đường kính > 1 cm) hoặc các vết nhiệt miệng kiểu herpes (có rất nhiều vết loét nhỏ) nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

- Không dùng cho vết thương bị nhiễm khuẩn, bóng hoặc vết thương sâu (vết thương chảy máu).
- Không dùng cho các trường hợp dị ứng với các dẫn xuất của salicylic.
- Không khuyến cáo sử dụng sản phẩm cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và cho con bú.
- Sản phẩm chỉ sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên.

THẬN TRỌNG

- Luôn đóng nắp sau mỗi lần sử dụng.
- Khuyến cáo sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày mở nắp.
- Sản phẩm chỉ sử dụng cho niêm mạc khoang miệng.
- Có thể gây ra cảm giác khó chịu tạm thời hoặc ngứa.
- Không bôi gel lên mặt ngoài của môi.
- Không được cậy bỏ lớp màng sau khi hình thành, lớp màng này sẽ tự biến mất.
- Nếu tình trạng không cải thiện sau 5 ngày điều trị, cần hỏi ý kiến bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không được uống.
- Không hút thuốc trong khi đang dùng sản phẩm, trước khi lớp màng khô lại hoặc để gần chai thuốc đang mở nắp.
- Nếu có nghi ngờ, hỏi ý kiến dược sĩ.
- Trong trường hợp bị loét miệng do thiết bị nha khoa, có thể dùng sản phẩm nếu vết thương không bị thiết bị nha khoa che phủ.

BẢO QUẢN

- Không dùng sau ngày hết hạn sử dụng ghi trên vỏ hộp.
- Tránh xa nguồn lửa và các chất dễ cháy nổ.
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

QUY CÁCH: Hộp 1 lọ x 6 ml

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất

NHÀ SẢN XUẤT: Laboratoires URGO HEALTHCARE
42 Rue De Longvic - 21300 Chenove - Pháp